




# AUSŲ KAMŠTELIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

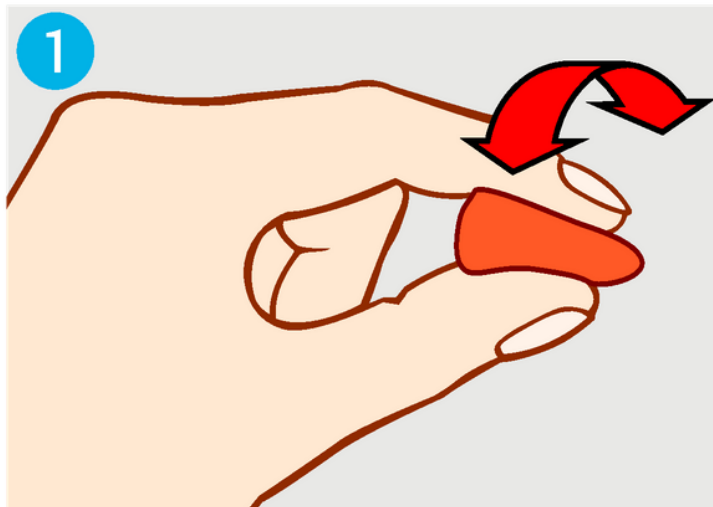


**Prieš kišant kamštelį į ausį, pasukiokite jį tarp pirštų, kol taps plonas ir cilindro formos**

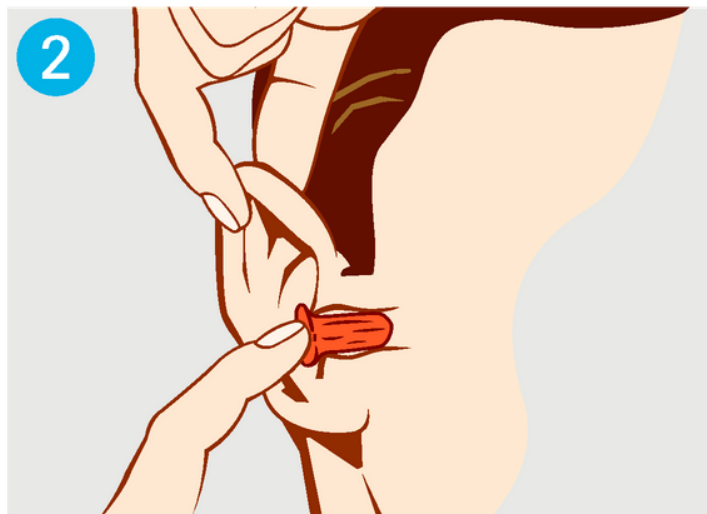

**Laisva ranka patempkite ausies kaušelį atgal ir į viršų. Kamštelį dėkite į ausį.**

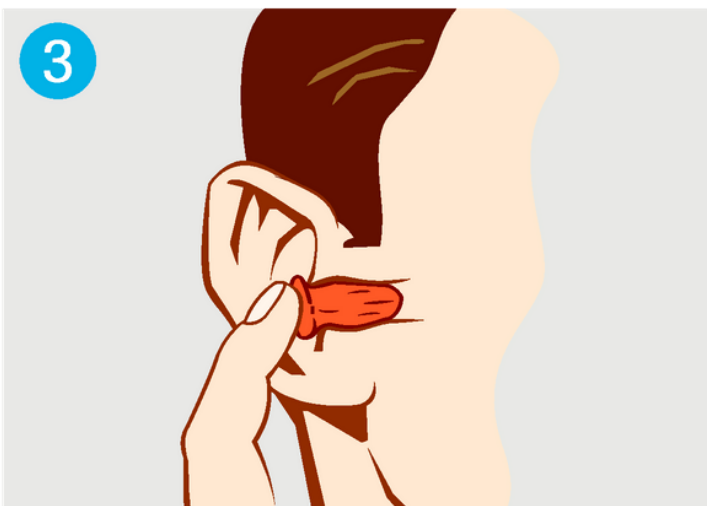

**Įkišę kamštelį į ausies kanalą, prilaikykite pirštu apie 10 sekundžių, kol jis išsiplės ir užpildys ausį**

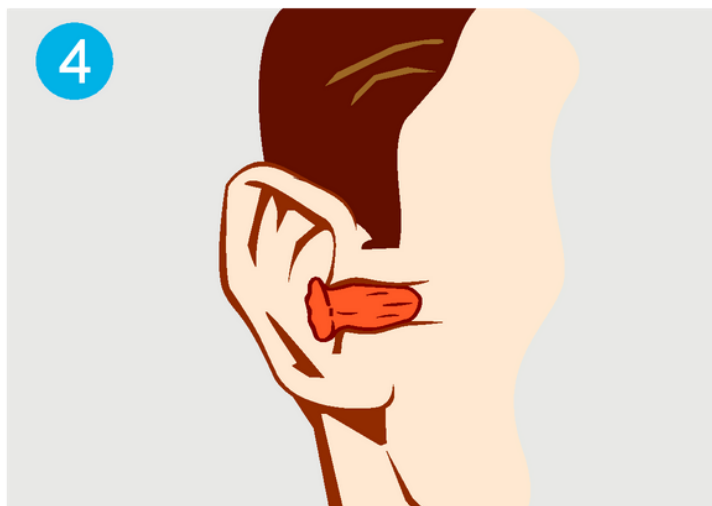

**Pakelkite ranką virš ausies ir nuleiskite, jei kamšteliai įdėti teisingai, nejausite jokių pokyčių ausyje**